

NDP Air Total + Green CE

Dezinfekce povrchů vzduchem



- Ideální pro vzduchovou dezinfekci zdravotnických povrchů (také zdravotnických prostředků), pro klinické prostředí: operační sály, infekční oblasti, sanitky, laboratoře, čisté prostory, lékařské poradny, zubní ordinace, veterinární poradny. K dostání také v biocidní verzi pro široké spektrum užití v kancelářích, dopravních prostředcích, obchodech, automobilech atd. - více na www.ndpair.cz
- Baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní a virucidní účinnost (další informace viz technický list produktu)
- Snadno použitelný produkt s „jednorázovým“ ventilem pro celkový výtlač. Není vyžadován žádný rozprašovač.
- Nehořlavý
- Netoxický
- Kompatibilní se všemi druhy materiálů a elektronických součástek.
- S ekologickým hnacím plynem HFO.



1 Položte lahvičku na rovný povrch a odpečte ji. Aplikujte v nepřítomnosti lidí.



2 Stiskněte a otočte ventil úplného vypouštění. Opusťte místnost. Produkt vytvoří oblak přibližně za 1-3 minuty



3 Po dokončení vypouštění dezinfekce nechte produkt působit.



4 Počkejte alespoň 1 hodinu nebo čas stanovený místními předpisy. Před opětovným vstupem do místnosti vyvětrejte.

Komentáře

- Použijte NDP Air Total + Green CE v místnostech, které byly vyčištěny. Před aplikací produktu je potřeba očistit povrchy.
- Před použitím výrobku vypněte detektor kouře.
- Roztok je bezpečný, ale některé přísady (například hnací plyn) mohou při kontaktu s dýchacími cestami a očima dráždit.
- Prezentace: 50 ml láhev do 40 m³ a 300 ml láhev do 150 m³.



Pro více informací