

Podrobný protokol pro správnou aplikaci **NDP Air Total + Green CE** v sanitkách:

1 Tvar a rozměry uvnitř sanitky.

Zohlednění šířky, délky a výšky dezinfikovaného místa usnadní správné rozhodnutí ohledně formátu a počtu jednotek, které mají být použity.


Tvar uvnitř sanitky je také důležitý; je možné, že kabina obsahuje překážky, které brání úplnému rozšíření dezinfekčního mraku. Je potřeba zajistit, aby dosáhl na všechny povrchy.

Poznámka: 50 ml láhev může pokrýt rozsáhlou plochu až 40 m³ a u 300 ml lahve přibližný objem 150 m³.

Před použitím NDP Air Total + Green CE vyberte vhodné místo pro sanitní dezinfekci, nejlépe otevřený dobře větraný prostor pro jeho další větrání.



2 Odpojte přívod kyslíku uvnitř sanitky.

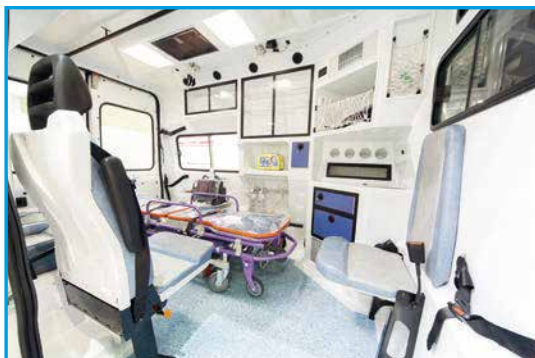

Před použitím systému k úplné dezinfekci NDP Air Total + Green CE je nutné sanitku ručně vyčistit podle doporučených pravidel.

Pokud je to možné, nejprve by měly být odstranitelné odnímatelné předměty, aby bylo možné vyčistit všechny povrchy.

Rovněž se doporučuje odpojit / izolovat kyslíková vedení a přívody.

3 Zavřete všechna okna v přední a zadní části sanitky.



Před aktivací NDP Air Total + Green CE zavřete všechna okna sanitky a ujistěte se, že kyslíkové vedení a zásoby byly odpojeny nebo izolovány.

Zavřete všechna okna a dveře sanitky, ale pokud je to možné, nechte otevřené okno mezi prostorem pro pacienta a řidičem.

4 Aplikujte přípravek (I).



Umístěte jednu nebo více lahví podle velikosti prostoru na rovný povrch ve středu kabiny.

Odjistěte (odpečete) ho.

5 Aplikujte přípravek (II).



Stiskněte a otáčejte ventilem palcem a ukazováčkem proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne do „spouštěcí polohy“, čímž se spustí proces úplného vypouštění. Směřujte ventil směrem od uživatele a vyvarujte se vdechování produktu.

Lahvičku postavte na vodorovný a stabilní povrch.

Doporučuje se používat rukavice, obličejovou masku a ochranné brýle. Produkt není toxický, ale může dráždit oči a dýchací cesty.

6 Aplikujte přípravek (III).



V případě potřeby použijte druhou láhev.

Postupujte podle stejných kroků, které jsou popsány výše: odstraňte bezpečnostní těsnění, utáhněte a otočte ventil a umístěte jej na stabilní a vodorovný povrch.

7 Aplikujte přípravek (IV).



NDP Air Total + Green CE je kompatibilní se všemi druhy lékařských a elektronických zařízení.

Jakmile se začne rozprašovat aerosol, opusťte a zavřete dveře sanitky. Po několika minutách se vytvoří oblak dezinfekčního prostředku, který se rozptýlí po celém interiéru sanitky a postupně se usadí na površích, včetně těch, které jsou obtížně dosažitelné pomocí tradičních dezinfekčních metod.

Poznámka: Produkt nechte působit bez lidí v sanitce.

8 Varovná znamení.



Doporučuje se umístit na dveře sanitky ceduli označující, že se používá produkt NDP Air Total + Green CE.

Zapište čas ukončení dezinfekce terminálu značkovačem na signální kartu vytištěnou na odolný materiál.

9 Stanovený čas / čas bezpečnosti



Po stanoveném čase podle místních předpisů (alespoň jednu hodinu) znovu otevřete okna a dveře sanitky, aby bylo umožněno větrání a proudění vzduchu do kabiny.

Produkt není toxický, ale některé složky mohou dráždit oči a dýchací cesty.

10 Nebarví povrchy.



Použití NDP Air Total + Green CE nevyžaduje žádné další oplachování ani otírání. Nezbarví povrchy a není nutné žádné další čištění.

V závislosti na velikosti sanitky (zejména je-li velmi malá) nebo podle typu podlahy (je-li kluzká) můžete odstranit zbytky dezinfekce otřením.

 Video adostupné na YouTube.

